

# Портативный алкотестер (алкометр)

## ARB-200

### Инструкция по эксплуатации

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Быстрое срабатывание
- Короткое время выхода на режим
- Эргономичный корпус
- Простота измерения
- Низкое энергопотребление
- Светодиодный фонарик
- Компактные размеры (брелок)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точка регистрирования	0.02% ВАС (содержание алкоголя в крови) 0.05% ВАС
Температура окружающей среды	0...+40°C
Время вхождения в режим	<10 сек.
Питание:	2 батарейки 1,5 В (типа ААА)
Размеры:	66x45x18мм
Вес (без батареек):	21 г

#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:



1. Светодиодный фонарик
2. Приемное отверстие
3. Светодиоды:
  - 0.05% ВАС (красный)
  - 0.02% ВАС (желтый)
  - Готовность (зеленый)
4. Фонарик
5. Тест на алкоголь

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ:**

1. Откройте крышку на обратной стороне прибора, установите 2 батарейки ААА (по 1,5В), затем закройте крышку. Нажмите кнопку с изображением бутылки; когда на панели появится зеленый светодиодный сигнал, тестер готов к использованию.

2. На лицевой панели тестера, вверху слева, имеется приемное отверстие; дышите прямо в это отверстие; тестер установит и покажет концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если концентрация алкоголя у вас в крови  $\geq 0.02\% \text{BAC}$  и  $< 0.05\% \text{BAC}$ , лампочка индикатора на панели засветится желтым, а зеленая лампочка погаснет. Если концентрация алкоголя у вас в крови  $\geq 0.05\% \text{BAC}$ , засветятся одновременно и желтая и красная лампочки, а зеленая погаснет.

3. Если вы нажмете кнопку с изображением солнца, на правой стороне тестера загорится лампочка; в этом режиме тестер можно использовать только в качестве фонарика.

4. Тестер работает только при нажатых кнопках. Когда вы отпускаете кнопки, тестер автоматически выключается.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Присутствие слишком большого количества посторонних газов в комнате, где проводится измерение, может повлиять на точность измерения.
- Поскольку алкоголь действует на разных людей по-разному, результаты такого тестирования могут служить только в качестве самопроверки, и не являются нормативом при вождении автомобиля.
- Производитель, импортер или дистрибьютор не несут никакой ответственности за использование данного прибора для оправдания каких-либо действий. Данный прибор не должен использоваться в качестве инструмента для определения способности человека на законных основаниях или безопасно управлять транспортным средством.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.